



# SUPER LUX

## MOULD CHART

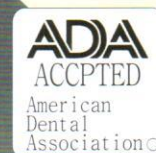

ADA15, TYPE I-II  
ISO 3336: 1993, TYPE 1 - TYPE 2







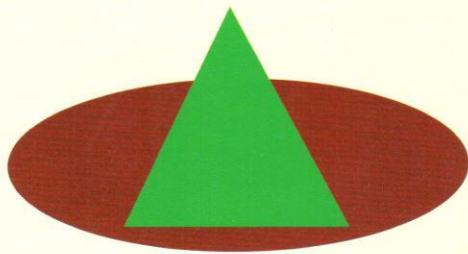

LUX  
SUPER  
S







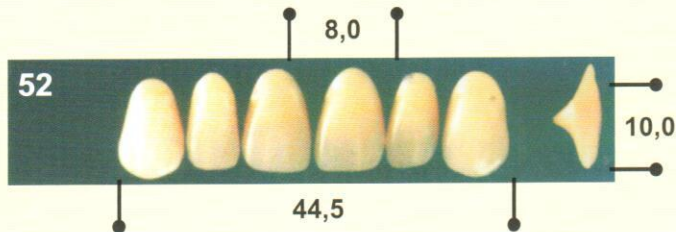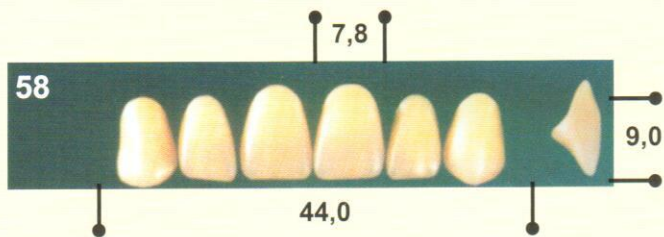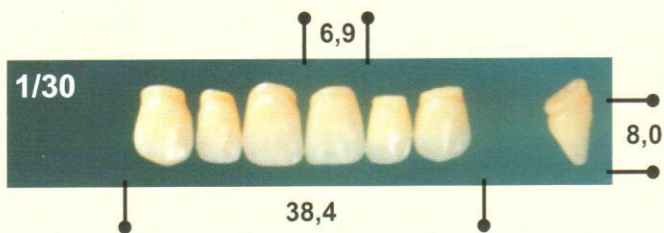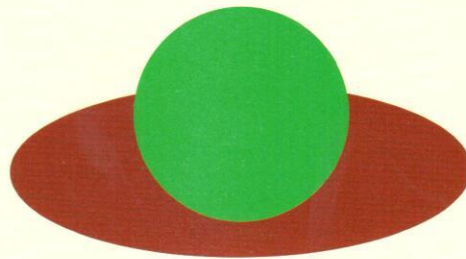







**MAJOR DENTAL**

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
|  | LATERAL PROFILE         |  |
|  | PROFIL LATERAL          |  |
|  | PERFIL LATERAL          |  |
|  | PROFILO LATERALE        |  |
|  | SIDEPROFIL              |  |
|  | SIVUPROFIILI Πλάγια όψη |  |
|  | ZIJPROFIEL              |  |
|  | SIDOPROFIL              |  |



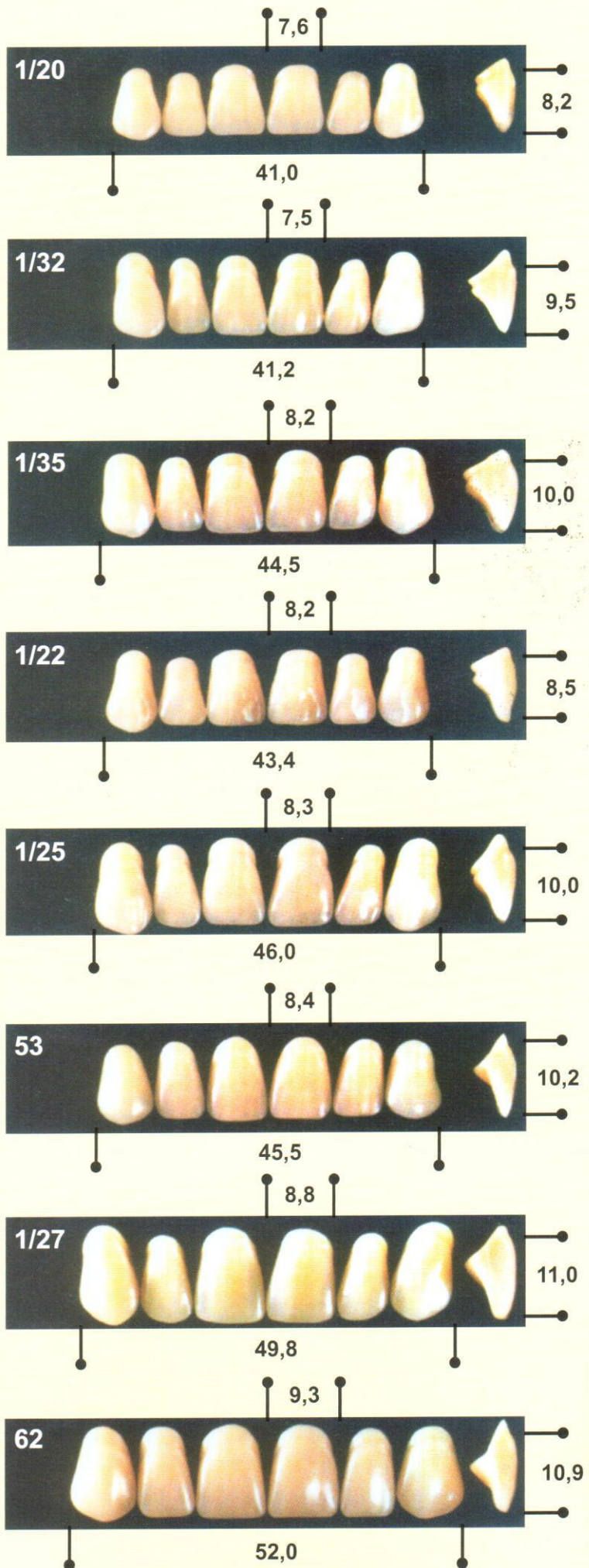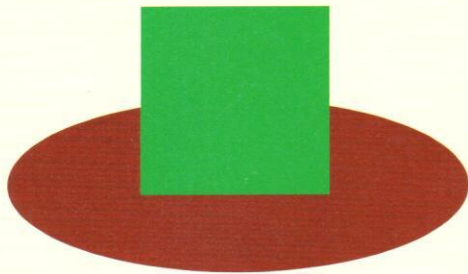



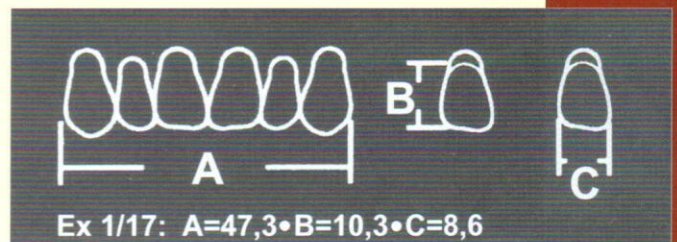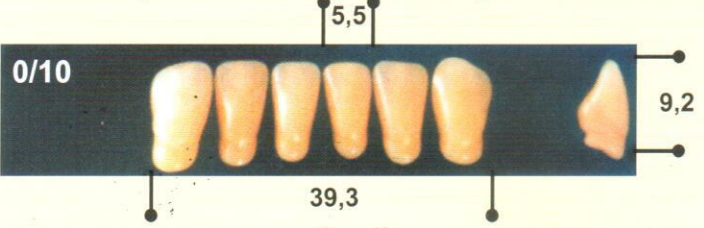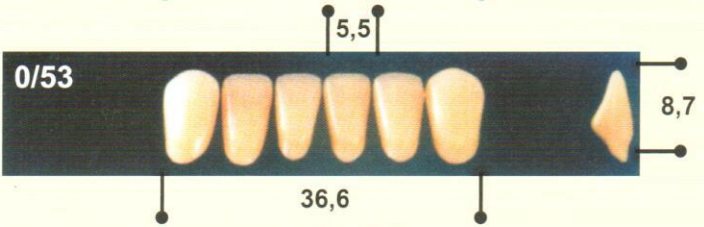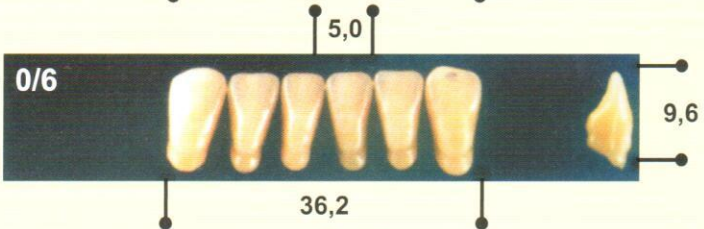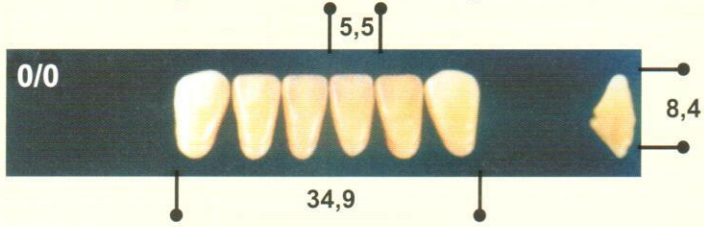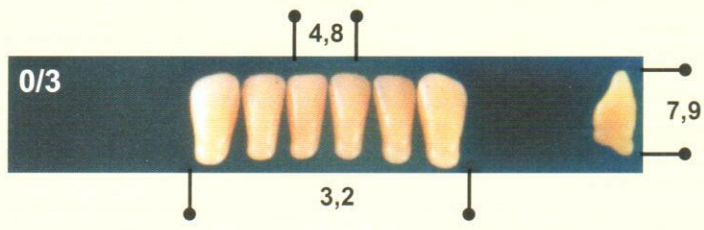










N-cusp

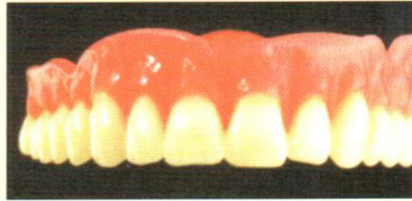



**SHADE GUIDES**

**A1-C3** (REF FDA 106 )

**A1-D4** (REF FDA 109)

**1A-6D** (REF FDA 108)

**11-41** (REF FDA 107)

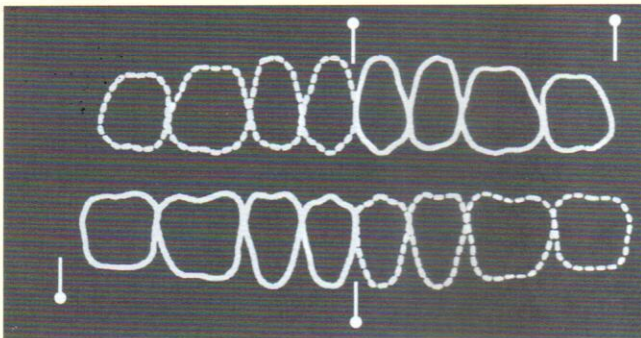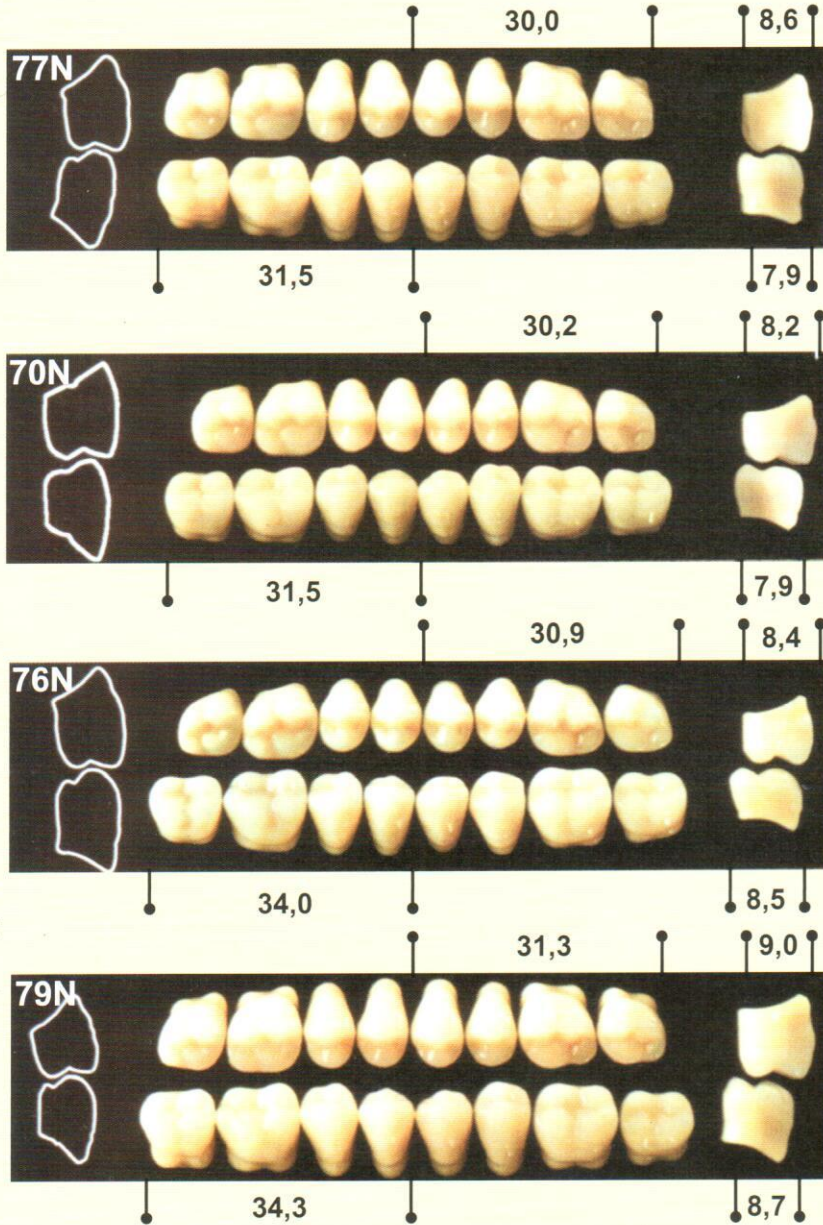

ARTICULATION COMBINATION CHART

ARTIKULATIONS TABELLE

TABLEAU D'ARTICULATION

TABLA DE ARTICULACION

TABELLA DI ARTICOLAZIONE

OVERSICHT OVER ARTIKULATION

PURENTATAULUKKO

ARTICULATIETABEL

TABELA DE ARTICULACAO

TABELL OVER LEDRORELSE



| Upper | Lower     | L-cups | N-cups |
|-------|-----------|--------|--------|
| 50    | 0,3       | 1,60   |        |
| 1/44  | 0/4-0/5   | 1/72   | 76N    |
| 1/13  | 0/5       | 1/74   | 76N    |
| 1/47  | 0/8-0/6   | 1/72   | 77N    |
| 1/17  | 0/8-0/10  |        | 77N    |
| 1/40  | 0/10-0/11 |        | 79N    |
| 1/49  | 0/10-0/11 |        | 79N    |
| 1/30  | 0/3       | 1/60   | 70N    |
| 56    | 0/0-0/4   | 1/65   | 76N    |
| 58    | 0/6-0/53  | 1/72   | 76N    |
| 52    | 0/53-0/6  | 1,72   | 77N    |
| 1/48  | 0/6       |        | 79N    |
| 1/37  | 0/8-0/10  |        | 77N    |
| 59    | 0/8-0/53  |        | 70N    |
| 1/20  | 0/3       | 1/60   | 70N    |
| 1/32  | 0/0-0/4   | 1/65   | 77N    |
| 1/22  | 0/5-0/53  | 1/74   | 76N    |
| 1/25  | 0/8-0/53  |        | 77N    |
| 53    | 0/53-0/6  | 1/72   | 76N    |
| 1/27  | 0/10-0/11 |        | 79N    |
| 62    | 0/11      |        | 79N    |



## SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROTHESIS

- ◆ Store in a clean, dry place away from light
- ◆ To ensure optimum bonding to the denture base resin, grind teeth on the cervix prior to setting up, remove wax and degrease with a methyl methacrylate monomer.
- ◆ Direct the patient to adopt daily hygiene protocols, suggest him to avoid excessive brushing which could cause abrasive wear, and not to immerse in alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials.
- ◆ This product does not contain substances classified as hazardous conforming to Directive 67/548/EEC and subsequent amendments. Consequently, no Material Safety Data Sheet is available.
- ◆ Grinding of the teeth generates dust which is classified as "not otherwise classifiable". Do not inhale. Use appropriate protection. TLV/TWA applies.
- ◆ Dispose conforming to local law. Product and packing materials are not listed in the Hazardous Waste inventory as per C.D.91/689/EEC 1(4). Patient-contacted materials are at infection risk even for disposal purposes (EU Hazardous Waste Inventory No. 180103).
- ◆ Available in the following shade guides: A1-C3 (REF FDA 106) A1-D4 (REF FDA 109) 1A-6D (REF FDA 108) 11-41 (REF FDA 107).

## TRÓJWARSTOWE ZĘBY AKRYLOWE DO PROTEZ DENTYSTYCZNYCH

- ◆ Przechowywać chroniąc przed wilgocią, kurzem i światłem. W celu dobrego połączenia z płytą protezy zszorstkować powierzchnię łączenia. Po wypaleniu wosku odtłuścić monomerem.
- ◆ Nie zawierają żadnych substancji szkodliwych w rozumieniu Dyrektywy 67/548/EEC.
- ◆ Podczas obróbki powstają pyły. Nie wdychać.
- ◆ Zalecane stosowanie wyciągów i maseczek.
- ◆ Produkt i jego opakowanie nie jest szkodliwe dla zdrowia.
- ◆ Produkt który miał kontakt z pacjentem może stwarzać zagrożenie dla zdrowia personelu. Powinien być sterylizowany lub utylizowany zgodnie z przepisami. Produkty dostępne w następujących zestawach kolorów: A1-D4; 1A-6D; A1-C3.
- ◆ Zalecenia higieniczne dla pacjentów: w celu utrzymania higieny codziennej wskazane mycie ogólnodostępnymi szczoteczkami i pastami do zębów po każdym posiłku. Do gruntownego czyszczenia używać tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych preparatów dostępnych w aptekach.
- ◆ Zabrania się kontaktu z kwasami, zasadami oraz innymi agresywnymi i żrącymi substancjami.

**Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:**

**MAJOR PL Sp. z o.o.**

ul. 11-go Listopada 10

26 -700 Zwolen

tel. 48 676 22 26

fax 48 676 33 47

email: [biuro@major.pl](mailto:biuro@major.pl)

[www.majorpl.pl](http://www.majorpl.pl)

sklep: [www.majorpl1.home.pl](http://www.majorpl1.home.pl)

# SUPER LUX



MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A.  
I - 10024 MONCALIERI - VIA LUIGI EINAUDI,23 - ITALY  
TEL + 39 011 640 02 11 - FAX + 39 011 640 02 22  
INTERNET: [www.major.it](http://www.major.it)

